

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL – URINALISA**  
**(PNPME-UR)**  
**SIKLUS 1 TAHUN 2025**

**1. JADWAL**

No	Kegiatan	Jadwal
		Siklus 1
1	Pembukaan Pendaftaran	02 Januari 2025
2	Batas akhir pendaftaran	28 Februari 2025
3	Pendistribusian Bahan Uji	15-29 April 2025
4	Pemeriksaan Serentak	14 Mei 2025
		(Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan)
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	27 Mei 2025
6	Feedback	24 Juni 2025

**2. APLIKASI PME ONLINE**

**Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :**

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

**3. BAHAN UJI**

Bahan uji yang dikirimkan kepada saudara sebanyak 1 (satu) paket yang terdiri dari 2 botol bahan uji urin, botol 1 dan botol 2.

Bahan uji yang diterima harus disimpan pada suhu 2<sup>0</sup>C sampai 8<sup>0</sup>C (lemari es).

**Perhatian:**

- Bahan uji berasal dari bahan infeksius, sehingga bahaya infeksi mungkin saja terjadi. Kerjakan secara hati-hati dengan memperhatikan teknik-teknik keamanan kerja laboratorium.
- Bahan uji yang sudah dibuka vialnya hanya stabil selama 1 hari.

**4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN**

- a. Ambil bahan uji dan lemari es, pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan.
- b. Diamkan pada suhu kamar selama 30 menit.
- c. Sebelum dilakukan pemeriksaan botol dihomogenkan beberapa kali, jangan dikocok agar tidak berbusa,
- d. Setelah dibuka periksalah parameter Berat jenis, pH, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, darah, Keton, Nitrit, Lekosit, Tes kehamilan dengan menggunakan metode pemeriksaan rutin yang biasa dipakai di laboratorium Saudara.

**Perhatian : Jangan menunda pemeriksaan setelah botol dibuka.**

**5. Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium peserta.**

**Kode : PNPME-UR**

- Botol 1 —> Label Kuning
- Botol 2 —> Label Hijau

**6. Pengisian Tanda Terima Objek Uji Profesiensi**

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil, Tanggal, Jam Pemerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

**7. Entry Hasil Ke Aplikasi PME Online**

- a. Pilih tanggal pemeriksaan bahan uji.
- b. Perhatikan Formulir hasil untuk botol 1 atau botol 2
- c. Pilih Option Metode, alat dan kualifikasi pemeriksa setiap parameter.  
Bila tidak tersedia pilihan tulis pada kolom keterangan dibawah.
- d. Pilih option hasil pemeriksaan pada kolom hasil pemeriksaan yang sudah disediakan.

Ketentuan pengisian hasil pemeriksaan adalah :	
- pH dan - berat jenis	} Berupa data kuantitatif.
- Protein, - Glukosa, - Bilirubin, - Urobilinogen, - Darah, - Keton dan - Leukosit	} berupa data semi kuantitatif. (+1, +2, +3, +4, Negatif)
- Nitrit dan - Tes Kehamilan	} berupa kualitatif (Positif atau Negatif).

- e. Tuliskan nama pemeriksa dan penanggung jawab laboratorium.
- f. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol “**simpan**” lalu klik “**unduh**” untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- g. Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik “**simpan perbaikan**” lalu klik “**unduh**”.
- h. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.
- i. Klik Tombol “**kirim**” untuk mengirim isian peserta, lalu klik “**unduh**” kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.

## 8. EVALUASI

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.

## 9. KERAHASIAN

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

## 10. FEED BACK

- Sebelum peserta mengunduh hasil, peserta diminta mengisi survey terhadap pelaksanaan kegiatan PME
- Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui aplikasi PME Online pada menu Feedback

## 11. TINDAKLANJUT

- Hasil evaluasi akan dirahasiakan dan hanya disampaikan ke Unit Saudara. Laporan hasil kegiatan PME disampaikan ke Direktorat Fasilitas mutu pelayanan Kesehatan Primer dan Dinas Kesehatan masing-masing Provinsi yang akan digunakan sebagai data untuk peningkatan kinerja Pemeriksaan Urinalisa di Laboratorium.

- Apabila Saudara memerlukan konfirmasi dalam melaksanakan PME ini dapat menghubungi :

- Rahmi Widiyawati : HP. 08127349068
- Amalia : HP. 081373968686

Palembang, Januari 2025

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang