

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL PATOLOGI
DIREKTORAT TAKEL PKP-INPULS
PARAMETER HEMATOLOGI
SIKLUS 1 TAHUN 2025

1. JADWAL

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pembukaan Pendaftaran	12 Januari 2025
2	Batas akhir pendaftaran	02 Maret 2025
3	Pendistribusian Bahan Uji	23-24 April 2025
4	Pemeriksaan Serentak	05 Mei 2024
		(Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan)
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	19 Mei 2025
6	Feedback	24 Juni 2025

2. APLIKASI PME ONLINE

Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

3. BAHAN UJI

Bahan uji yang dikirimkan kepada saudara sebanyak 1 (satu) paket yang terdiri dari 2 botol bahan uji hematologi, botol 1 dan botol 2.

Bahan uji yang diterima harus disimpan pada suhu 2^o - 8^oC (lemari es).

Perhatian:

Bahan uji berasal dari bahan infeksius, oleh karena itu bahaya terinfeksi dapat terjadi. Kerjakan secara hati-hati dengan memperhatikan teknik-teknik keamanan kerja laboratorium.

4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- a. Ambil bahan uji dari lemari es, pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan.
- b. Diamkan pada suhu kamar selama 30 menit.
- c. Sebelum dilakukan pemeriksaan botol dihomogenkan beberapa kali dengan hati-hati.
- d. Lakukan pemeriksaan parameter Hemoglobin, Leukosit, Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, MCV, MCH dan MCHC menggunakan metode pemeriksaan rutin yang biasa dipakai di laboratorium Saudara.

Perhatian : Jangan menunda pemeriksaan setelah botol dibuka.

Untuk Peserta yang menggunakan alat Sysmex XN Series maka lakukan pemilihan chanel sebagai berikut:

Sysmex Model–XN
Analysis Mode–CBC / Patient
Report: TNC–N from WNR channel

Sysmex Model–XN–L
Analysis Mode–CBC / Patient
Report: Total WBC from WDF channel

Sysmex Model–XS
Analysis Mode–CBC / Patient
Report: Total WBC from histogram

Sysmex Model–XT
Analysis Mode–CBC / Patient
Report: Total WBC from WBC/BASO channel

Sysmex Model–XE
Analysis Mode–CBC / Patient

5. Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium peserta.

Kode : PNPME-HE

- Botol 1 → Label Kuning
- Botol 2 → Label Hijau

6. PENGISIAN TANDA TERIMA OBJEK UJI PROFESIENSI

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

7. ENTRY HASIL KE APLIKASI PME ONLINE

- a. Pilih tanggal pemeriksaan bahan uji.
- b. Perhatikan Formulir hasil untuk botol 1 atau botol 2
- c. Pilih Option Metode, alat dan kualifikasi pemeriksa setiap parameter.
Bila tidak tersedia pilihan tulis pada kolom keterangan dibawah.
- d. Input hasil pemeriksaan pada kolom hasil pemeriksaan yang sudah disediakan.

Ketentuan pengisian hasil pemeriksaan adalah :

- Trombosit

→

Hasil dinyatakan tanpa desimal,
Trombosit : **Tanpa Dikalikan 1000**
(contoh 275000 dientry menjadi 275)

- Hemoglobin,

- Leokosit,

- Hematokrit,

- MCV,

- MCH,

- MCHC,

}

Hasil dinyatakan dalam 1 desimal (satu angka dibelakang koma).
Leukosit : **Tanpa Dikalikan 1000**
(contoh 7100 dientry menjadi 7.1)

- Eritrosit

→

Hasil dinyatakan dalam 2 desimal (dua angka dibelakang koma)
Eritrosit : **Tanpa Dikalikan 1 juta**
(contoh 4450000 dientry menjadi 4.45)

Masukkan hasil pemeriksaan PME di masing-masing kolom hasil parameter yang tersedia dengan format diatas dan **GUNAKAN TANDA TITIK (.) SEBAGAI PENGGANTI KOMA.**

- e. Tuliskan nama pemeriksa dan penanggung jawab laboratorium.
- f. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol “**simpan**” lalu klik “**unduh**” untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- g. Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik “**simpan perbaikan**” lalu klik “**unduh**” .
- h. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.

Halaman 3 dari 4

FR.MU.043/Rev.0/110920

- i. Klik Tombol “ **kirim**” untuk mengirim isian peserta, lalu klik “**unduh**” kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.

8. **EVALUASI**

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

9. **KERAHASIAAN**

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

10. **FEED BACK**

- Sebelum peserta mengunduh hasil, peserta diminta mengisi survey terhadap pelaksanaan kegiatan PME
- Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui aplikasi PME Online pada menu Feedback

11. **TINDAKLANJUT**

- Hasil evaluasi akan dirahasiakan dan hanya disampaikan ke Unit Saudara. Laporan hasil kegiatan PME disampaikan ke Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Dinas Kesehatan masing-masing Provinsi yang akan digunakan sebagai data untuk peningkatan kinerja Pemeriksaan Hematologi di Laboratorium.
- Apabila Saudara memerlukan konfirmasi dalam melaksanakan PME ini dapat menghubungi :
 - Rahmi Widiyawati : HP. 08127349068
 - Amalia : HP. 081373968686

Palembang, Januari 2025

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang