

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNALMIKROBIOLOGI
PARAMETER PARASIT SALURAN PENCERNAAN (PNPME-TC)
SIKLUS 1 TAHUN 2025

1. JADWAL

No	Kegiatan	Jadwal
		Siklus 1
1	Pembukaan Pendaftaran	02 Januari 2025
2	Batas akhir pendaftaran	05 Maret 2025
3	Pendistribusian Bahan Uji	28 April-05 Mei 2025
4	Pemeriksaan Serentak	19 Mei 2025
		(Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan)
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	02 Juni 2025
6	Feedback	24 Juni 2025

2. APLIKASI PME ONLINE


Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

3. PENANGANAN OBJEK UJI

- PNPME-TC Parasit Saluran Pencernaan dikirim sebanyak 3 (tiga) vial suspensi tinja yang mungkin sudah mengandung 1 atau lebih spesies parasit saluran pencernaan (telur cacing) sebelum melakukan pemeriksaan sampel dihomogenkan terlebih dahulu.
- **PERHATIAN : Objek uji berasal dari manusia dan infeksius, oleh karena itu kerjakan dengan hati-hati dengan memperhatikan keamanan kerja laboratorium.**

- **Kode bahan** terdapat pada wadah pot bahan uji.
- **Kode bahan uji** terdapat di masing-masing vial.

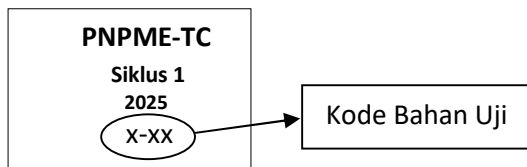

4. Pengisian Tanda Terima Objek Uji Profisiensi

- Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- Input nama Personil penerima, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- Input Jumlah bahan yang diterima
- Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- Isi Keterangan bila diperlukan
- Simpan, klik kembali ke dashboard

5. PEMERIKSAAN

- Setelah suspensi diterima laboratorium, segera lakukan pemeriksaan.
- Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang melakukan pemeriksaan sampel rutin, dan diperlakukan dengan cara yang sama seperti sampel rutin.
- Prosedur Pemeriksaan:
 - Tetesi Eosin atau Lugol sebanyak 1-2 tetes diatas sediaan.
 - Buka vial yang berisi suspensi tinja dengan hati-hati.
 - Homogenkan dengan menggunakan pipet.
 - Ambil bagian sedimen/endapan, campur hingga rata, tutup dengan kaca penutup, upayakan tidak terbentuk gelembung udara.
 - Periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 10x10, seluruh lapangan sediaan, bila belum jelas gunakan pembesaran 10x40 untuk mengamati morfologi telur cacing.
 - Catat nama genus dan spesies atau jenis telur cacing yang ditemukan

6. Entry Hasil Ke Aplikasi PME Online

- Tuliskan Tanggal pemeriksaan
- Pilih Kode Bahan A/B/C sesuai dengan kode bahan yang ada pada wadah pot bahan uji.**
- Pilih Hasil Pemeriksaan sesuai urutan nomor bahan dari yang terkecil hingga yang terbesar
- Tulis nama pemeriksa (lengkap beserta gelar), kualifikasi pendidikan pemeriksa, nama penanggung jawab laboratorium
- Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol **“simpan”** lalu klik **“unduh”** untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik **“simpan perbaikan”** lalu klik **“unduh”** sebelum klik tombol “Kirim”.

- g. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.
- h. Klik Tombol “**kirim**” untuk mengirim isian peserta, lalu klik “**unduh**” kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.

7. **EVALUASI**

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang

Dinyatakan Lulus apabila Skor rata-rata ≥ 20 .

8. **KERAHASIAN**

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

9. **FEEDBACK**

- Sebelum peserta mengunduh hasil, peserta diminta mengisi survey terhadap pelaksanaan kegiatan PME
- Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui aplikasi PME Online pada menu Feedback.

10. **TINDAKLANJUT**

Hasil evaluasi akan dirahasiakan dan hanya disampaikan ke Unit Saudara. Laporan hasil kegiatan PME disampaikan ke Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Dinas Kesehatan Masing-masing provinsi yang akan digunakan sebagai data untuk peningkatan kinerja Pemeriksaan Mikroskopis Parasit saluran pencernaan di Laboratorium.

Apabila Saudara membutuhkan konfirmasi terhadap pelaksanaan PME, dapat menghubungi :

- Rahmi Widiyawati : HP. 08127349068
- Nellyana : HP. 085357728198

Palembang, Januari 2025

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang