

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL MIKROBIOLOGI
DIREKTORAT TAKEL PKP-INPULS
PARAMETER MALARIA
SIKLUS 2 TAHUN 2025**

1. JADWAL

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pembukaan Pendaftaran	13 Maret 2025
2	Batas akhir pendaftaran	11 April 2025
3	Pendistribusian Bahan Uji	22-24 September 2025
4	Pemeriksaan Serentak	03 Oktober 2025
		(Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan)
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	16 Oktober 2025
6	Feedback	17 November 2025
7	Banding Hasil	18 November – 04 Desember 2025


2. APLIKASI PME ONLINE

Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

3. PENANGANAN BAHAN UJI

- PNPME Mikroskopis malaria yang dikirim berupa 10 (sepuluh) sediaan darah yang sudah diwarnai dengan pewarnaan Giemsa 3% dan telah diawetkan. Tiap preparat awetan terdiri dari sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis.
- **PERHATIAN : Bahan uji PNPME Mikroskopis Malaria merupakan bahan infeksius sehingga bahaya infeksi bisa saja terjadi. Kerjakan dengan hati-hati dengan memperhatikan K3 laboratorium**
- Tidak disarankan melakukan pewarnaan ulang.
- Kode bahan terdapat pada box sediaan.
- Kode sediaan terdapat di masing-masing sediaan.

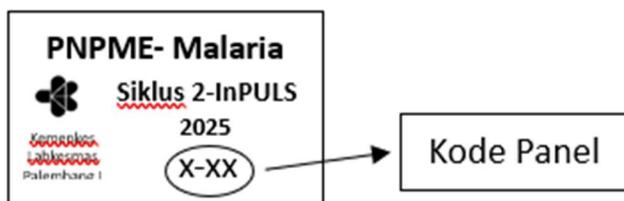

4. Pengisian Tanda Terima Objek Uji Profisiensi

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil penerima, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

5. PEMERIKSAAN

- a. Setelah sediaan diterima, laboratorium segera lakukan pemeriksaan.
- b. Pembacaan sediaan dilakukan oleh petugas yang melakukan pengerjaan sampel rutin, dan diperlakukan dengan cara yang sama seperti sampel rutin.
- c. Prosedur Pemeriksaan :
 - Buka kotak sediaan.
 - Periksa Objek uji PN-PME malaria menggunakan mikroskop dengan lensa objektif 10x untuk mencari lapangan pandang kemudian pindahkan ke lensa objektif 100x untuk memperjelas lapangan pandang.
 - Identifikasi spesies dan stadium:

Sediaan darah tebal digunakan untuk *screening* ada tidaknya parasit *Plasmodium*. Pembacaan dilakukan hingga 200 lapangan pandang untuk menyimpulkan hasil negatif, Jika ditemukan bentukan parasit *Plasmodium*, lakukan identifikasi spesies *Plasmodium* beserta stadiumnya pada sediaan darah tipis.
 - Hitung kepadatan parasit (untuk semua sediaan positif apapun spesiesnya)
 1. Dilakukan pada sediaan darah tebal.
 2. **Parasit yang dihitung hanya stadium aseksual.**

3. Hitung jumlah parasit dan jumlah leukosit dalam tiap lapangan pandang sampai jumlah leukosit mencapai 200 leukosit.
4. Jika dalam 200 leukosit hanya ditemukan 99 Parasit atau kurang, lanjutkan pemeriksaan sampai menjadi 500.
5. Untuk mempermudah proses menghitung, gunakan 2 buah *tally counter*.
6. Rumus Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah parasit}}{\text{Jumlah leukosit}} \times 8000 = \dots \dots \dots \text{parasit}/\mu\text{ldarah}$$

Contoh :

$$\sum \text{Parasit} = 153$$

$$\sum \text{leukosit} = 215$$

$$\frac{153}{215} \times 8000 = 5693 \text{ parasit}/\mu\text{ldarah}$$

d. Catat hasil pemeriksaan

6. Entry Hasil Ke Aplikasi PME Online

- Tuliskan Tanggal pemeriksaan
- **Pilih Kode Bahan A/B/C sesuai dengan kode bahan yang ada pada box sediaan.**
- Pilih Hasil Pemeriksaan sesuai urutan nomor bahan dari yang terkecil hingga yang terbesar.
- Isi pada kolom yang telah disediakan
 - a. Jika dalam 200 LP sediaan darah tebal tidak ditemukan Plasmodium, pilih hasil **NEGATIF**
Jika ditemukan Plasmodium, pilih hasil **POSITIF** kemudian pilih hasilnya mulai dari genus dan spesiesnya, contoh :
 - Plasmodium falcifarum*
 - Plasmodium vivax*
 - Plasmodium malariae*
 - Plasmodium ovale*
 - Mix (*Plasmodium falcifarum* dan *Plasmodium vivax*)
 - Mix (*Plasmodium falcifarum* dan *Plasmodium malariae*)
 - b. Setelah mengisi nama Genus dan spesiesnya kemudian isilah stadium dari spesies tersebut, contoh :
 - Stadium Trophozoit
 - Stadium Schizont
 - Stadium Gametosit
 - c. Isilah hasil perhitungan kepadatan parasit pada kolom yang telah disediakan.
 - d. Untuk hasil yang negatif kepadatan parasit dientri 0 (nol).
 - e. Tulis nama pemeriksa (lengkap beserta gelar), kualifikasi pendidikan pemeriksa, nama penanggung jawab laboratorium

- f. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol “**simpan**” lalu klik “**unduh**” untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- g. Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik “**simpan perbaikan**” lalu klik “**unduh**”.
- h. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.
- i. Klik Tombol “**irim**” untuk mengirim isian peserta, lalu klik “**unduh**” kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.
- j. **Peserta wajib mengisi/ Input seluruh parameter yang dipilih ke dalam aplikasi PME BBLKM Palembang**

7. KERUSAKAN

Jika ada kerusakan pada bahan uji, silahkan menghubungi Admin PME untuk koordinasi.

8. BANDING HASIL

Peserta dapat melakukan banding hasil dengan mengkonfirmasi serta mengisi formulir banding yang dikirimkan oleh Admin PME. Formulir banding hasil yang telah diisi dan ditandatangani oleh penanggung jawab laboratorium peserta dikirimkan kembali ke penyelenggara uji profisiensi (dalam bentuk file PDF) melalui email pemantapan.mutu.bimtek@gmail.com atau WA Admin PME (0896-8340-2252). Banding hasil hanya dapat diajukan dalam 14 hari sejak tanggal hasil evaluasi dikeluarkan. Penjelasan hasil evaluasi banding hasil diberitahukan paling lambat 14 hari setelah banding peserta diterima.

Kriteria banding hasil :

1. Mengirimkan foto hasil pemeriksaan yang dibanding.
2. Mengembalikan sediaan (objek uji) yang akan dibanding dan telah dikemas dengan baik dengan biaya pengiriman ditanggung oleh peserta yang mengajukan banding.

9. KERAHASIAN

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

10. FEEDBACK

- Sebelum peserta mengunduh hasil, peserta diminta mengisi survey terhadap pelaksanaan kegiatan PME
- Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui aplikasi PME Online pada menu Feedback

11. TINDAKLANJUT

- Hasil evaluasi akan dirahasiakan dan hanya disampaikan ke Unit Saudara. Laporan hasil kegiatan PME disampaikan ke Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Dinas Kesehatan masing-masing Provinsi yang akan digunakan sebagai data untuk peningkatan kinerja Pemeriksaan Mikroskopis Malaria di Laboratorium.

- Apabila Saudara membutuhkan konfirmasi terhadap pelaksanaan PME, dapat menghubungi:
 - Rahmi Widiyawati : HP. 08127349068
 - Nellyana : HP. 085357728198

Palembang, Agustus 2025
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang