

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL PATOLOGI
DIREKTORAT TAKEL PKP-INPULS
PARAMETER URINALISA
SIKLUS 2 TAHUN 2025**

1. JADWAL

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pembukaan Pendaftaran	13 Maret 2025
2	Batas akhir pendaftaran	11 April 2025
3	Pendistribusian Bahan Uji	22-24 September 2025
4	Pemeriksaan Serentak	03 Oktober 2025
		(Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan)
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	16 Oktober 2025
6	Feedback	17 November 2025
7	Banding Hasil	18 November – 04 Desember 2025

2. APLIKASI PME ONLINE

Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

3. BAHAN UJI

Bahan uji yang dikirimkan kepada saudara sebanyak 1 (satu) paket yang terdiri dari 2 botol bahan uji urin, botol 1 dan botol 2.

Bahan uji yang diterima harus disimpan pada suhu 2°C sampai 8°C (lemari es).

Perhatian:

- Bahan uji berasal dari bahan infeksius, sehingga bahaya infeksi mungkin saja terjadi. Kerjakan secara hati-hati dengan memperhatikan teknik-teknik keamanan kerja laboratorium.
- Bahan uji yang sudah dibuka vialnya hanya stabil selama 1 hari.

4. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- a. Ambil bahan uji dari lemari es, pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan.
- b. Diamkan pada suhu kamar selama 30 menit.
- c. Sebelum dilakukan pemeriksaan botol dihomogenkan beberapa kali, jangan dikocok agar tidak berbusa,
- d. Setelah dibuka periksalah parameter Berat jenis, pH, Protein, Glukosa, Bilirubin, Urobilinogen, darah, Keton, Nitrit, Lekosit, Tes kehamilan dengan menggunakan metode pemeriksaan rutin yang biasa dipakai di laboratorium Saudara.

Perhatian : Jangan menunda pemeriksaan setelah botol dibuka.

5. Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium peserta.

Kode : PNPME-UR

Botol 1 —→ Label Kuning

Botol 2 —→ Label Hijau

6. Pengisian Tanda Terima Objek Uji Profesiensi

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

7. Entry Hasil Ke Aplikasi PME Online

- a. Pilih tanggal pemeriksaan bahan uji.
- b. Perhatikan Formulir hasil untuk botol 1 atau botol 2
- c. Pilih Option Metode, alat dan kualifikasi pemeriksa setiap parameter.
Bila tidak tersedia pilihan tulis pada kolom keterangan dibawah.
- d. Pilih option hasil pemeriksaan pada kolom hasil pemeriksaan yang sudah disediakan.

Ketentuan pengisian hasil pemeriksaan adalah :	
- pH dan - berat jenis	} Berupa data kuantitatif.
- Protein, - Glukosa, - Bilirubin, - Urobilinogen, - Darah, - Keton dan - Leukosit	} berupa data semi kuantitatif. (+1, +2, +3, +4, Negatif)
- Nitrit dan - Tes Kehamilan	} berupa kualitatif (Positif atau Negatif).

- e. Tuliskan nama pemeriksa dan penanggung jawab laboratorium.
- f. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol “**simpan**” lalu klik “**unduh**” untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- g. Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik “**simpan perbaikan**” lalu klik “**unduh**”.
- h. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.
- i. Klik Tombol “**kirim**” untuk mengirim isian peserta, lalu klik “**unduh**” kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.

8. EVALUASI

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang.

9. KERAHASIAN

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

10. FEED BACK

- Sebelum peserta mengunduh hasil, peserta diminta mengisi survey terhadap pelaksanaan kegiatan PME
- Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui aplikasi PME Online pada menu Feedback

11. TINDAKLANJUT

- Hasil evaluasi akan dirahasiakan dan hanya disampaikan ke Unit Saudara. Laporan hasil kegiatan PME disampaikan ke Direktorat Fasilitas mutu pelayanan Kesehatan Primer dan Dinas Kesehatan masing-masing Provinsi yang akan digunakan sebagai data untuk peningkatan kinerja Pemeriksaan Urinalisa di Laboratorium.

- Apabila Saudara memerlukan konfirmasi dalam melaksanakan PME ini dapat menghubungi :

- Rahmi Widiyawati : HP. 08127349068
- Amalia : HP. 081373968686

Palembang, Agustus 2025
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang