

**PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM NASIONAL PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL – HbA1c
(PNPME-HbA1c)
SIKLUS 1 TAHUN 2026**

1. JADWAL

No	Kegiatan	Jadwal
		Siklus 1
1	Pembukaan Pendaftaran	02 Januari 2026
2	Batas akhir pendaftaran	28 Februari 2026
3	Pendistribusian Bahan Uji	13 - 20 April 2026
4	Pemeriksaan Serentak	04 Mei 2026
		(Khusus Bahan UP Mikrobiologi segera dilakukan pemeriksaan)
5	Batas Akhir Penerimaan Jawaban	25 Mei 2026
6	Feedback	25 Juni 2026

2. APLIKASI PME ONLINE

Peserta dapat mengakses/mengunduh menu :

- a. Pendaftaran
- b. Unggah Bukti Pembayaran
- c. Verifikasi Bukti Pembayaran
- d. Distribusi Bahan Uji
- e. Tanda Terima Bahan Uji
- f. Pemeriksaan dan Entry Hasil
- g. Informasi Entry Hasil Terkirim
- h. Survey Kepuasan Pelanggan
- i. Hasil Evaluasi
- j. Laporan Evaluasi
- k. Juknis per bidang pemeriksaan
- l. Skema

3. BAHAN UJI

Bahan uji yang dikimkan kepada saudara sebanyak 1 (satu) paket yang terdiri dari 2 botol bahan uji HbA1c, botol 1 dikerjakan pada pengerjaan serentak siklus 1 dan botol 2 dikerjakan pada pengerjaan serentak siklus 2 tahun 2026.

Bahan uji yang diterima harus disimpan pada suhu 2⁰ - 8⁰C (lemari es).

Perhatian:

Bahan uji berasal dari bahan infeksius, oleh karena itu bahaya terinfeksi dapat terjadi. Kerjakan secara hati-hati dengan memperhatikan teknik-teknik keamanan kerja laboratorium.

4. CARA MELARUTKAN BAHAN UJI

- Pipetkan dengan pipet volumetrik **Tepat 0.5 mL** aquabides kualitas tinggi kedalam bahan uji yang akan diperiksa.
- Diamkan selama 5-10 menit pada suhu kamar.
- Botol bahan uji yang akan diperiksa dihomogenkan beberapa kali dengan hati-hati sehingga isi dalam botol terlarut dengan sempurna. Jangan dikocok, hindarilah terjadinya busa.
- Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan parameter yang tertera dalam input hasil dengan menggunakan metode pemeriksaan dan alat yang biasa dilakukan di laboratorium Saudara dan diperlakukan sama seperti sampel sehari-hari.

Perhatian : Jangan menunda pemeriksaan setelah botol dibuka

5. Bahan uji diperiksa secara serentak oleh semua laboratorium

Kode: PNPME-HbA1c —————> Label Biru

6. Pengisian Tanda Terima Objek Uji Profisiensi

- a. Klik Isi tanda terima bahan pada menu dashboard peserta PME
- b. Input nama Personil, Tanggal, Jam Penerimaan, jabatan dan No Telp Personil
- c. Input Jumlah bahan yang diterima
- d. Input kondisi bahan yang diterima (pilih option)
- e. Isi Keterangan bila diperlukan
- f. Simpan, klik kembali ke dashboard

7. Entry Hasil Ke Aplikasi PME Online

Isilah hasil pemeriksaan pada Aplikasi hasil pemeriksaan yang telah disiapkan seperti dibawah ini :

- a. Pilih tanggal pemeriksaan bahan uji.
- b. Pilih Option Metode, alat dan kualifikasi pemeriksa.
Bila tidak tersedia pilihan tulis pada kolom keterangan dibawah
- c. Input hasil pemeriksaan menggunakan 1 (satu) desimal dan dimasukkan dalam satuan persentase (%) pada kolom hasil pemeriksaan yang sudah disediakan.

Ketentuan pengisian hasil pemeriksaan adalah

- HbA1c

} Hasil dinyatakan dalam **satu desimal**
(satu angka dibelakang koma), contoh
:
HbA1c : 6.2

Masukkan hasil pemeriksaan PME di masing-masing kolom hasil parameter yang tersedia dengan format diatas dan **GUNAKAN TANDA TITIK (.) SEBAGAI PENGGANTI KOMA.**

- d. Apabila tidak dikerjakan maka ditulis tanda (-) dan bukan angka nol (0)
- e. Tuliskan nama pemeriksa dan penanggung jawab laboratorium.
- f. Teliti kembali apakah formulir hasil sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai petunjuk diatas, kemudian klik tombol "**simpan**" lalu klik "**unduh**" untuk preview atau arsip jika suatu saat dibutuhkan atau verifikasi.
- g. Bila ada perbaikan pada formulir hasil, jangan lupa klik "**simpan perbaikan**" lalu klik "**unduh**".
- h. Pastikan kembali bahwa hasil yang akan dikirim sudah benar.
- i. Klik Tombol "**kirim**" untuk mengirim isian peserta, lalu klik "**unduh**" kembali untuk arsip jika suatu saat dibutuhkan.

8. EVALUASI

Dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

9. KERAHASIAAN

Untuk menjamin kerahasiaan, setiap peserta PME memiliki akun yang tidak diketahui oleh peserta lain.

10. FEED BACK

- Sebelum peserta mengunduh hasil, peserta diminta mengisi survey terhadap pelaksanaan kegiatan PME
- Keluhan dan saran dapat disampaikan melalui aplikasi PME Online pada menu Feedback

11. TINDAKLANJUT

- Hasil evaluasi akan dirahasiakan dan hanya disampaikan ke Unit Saudara. Laporan hasil kegiatan PME disampaikan ke Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Dinas Kesehatan masing-masing provinsi yang akan digunakan sebagai data untuk peningkatan kinerja Pemeriksaan HbA1c di Laboratorium.
- Apabila Saudara memerlukan konfirmasi dalam melaksanakan PME ini dapat menghubungi :

- Rahmi Widiyawati : HP. 08127249068
- Amalia : HP. 081373968686

Palembang, Maret 2026
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang